


Rellenar, modelar y Listo

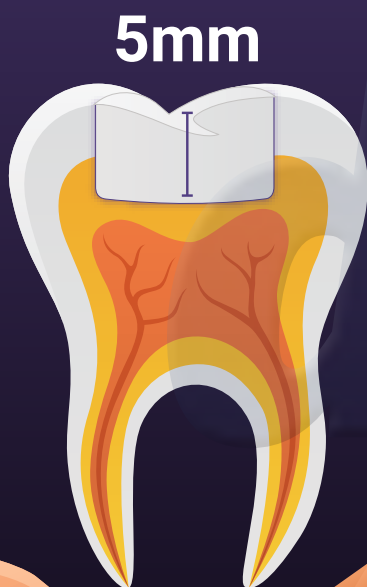

una máxima
escala de relleno
hasta 5 mm

Fotocurado con
LED durante 20 seg.



“ Utilizo **aura bulk fill** desde hace tres años. La resina sale suavemente sin retrocesos y realiza un curado muy fuerte. El pulido es asombroso y mis composites posteriores no han sido nunca mejores. Las características son ideales para cualquier restauración, de dientes primarios o permanentes. He recomendado este producto a muchos colaboradores y pienso seguir usando **aura bulk fill** como mi única fuente de composite.

Dr Liel Grinbaum, DMD



Your Smile. Our Vision.
www.sdi.com.au

dd
DepoDent
España
Depósito Dental

aura bulk fill
material restaurador ultra universal

aura bulk fill



The Dental Advisor, Vol. 33,
No. 07, September 2016

Un tono. Un relleno.

Restauraciones posteriores con composite rápidas y sencillas.

- Acabado de aspecto natural con un único tono universal
- Gran profundidad de curado sin necesidad de una capa de nivelación
- Colocación fácil en tan solo unos segundos
- Su consistencia cerosa es firme y no se pega para optimizar la manipulación

2.21%

Contracción volumétrica baja

aura bulk fill ofrece menor estrés para proporcionar restauraciones de larga duración.

115 MPa

Excelente resistencia a la flexión

aura bulk fill resiste las grandes deformaciones sin fracturarse.

375 MPa

Alta resistencia a la compresión

aura bulk fill resiste a las altas fuerzas compresivas de la boca.




Profundidad de curado

La opacidad de **aura bulk fill** es función de la diferencia del índice de refracción de sus dos componentes, el relleno y la resina.

El proceso de curado altera el índice de refracción de la resina marginalmente, para hacerlo coincidir con el índice de refracción del relleno.

Esto disminuye la opacidad temporalmente, permitiendo una penetración de la luz más profunda para un curado de gran profundidad.

Tras el curado, los índices varían de nuevo para lograr la opacidad ideal para el brillante acabado camaleónico de **aura bulk fill**.

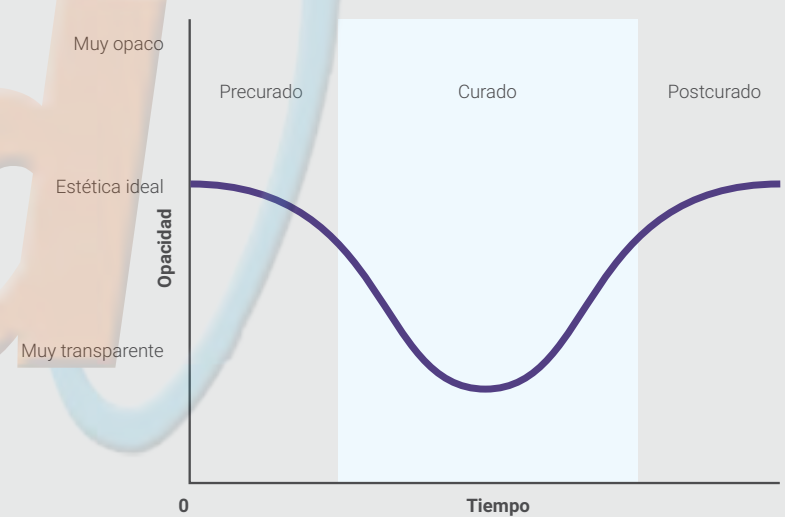

Dr. Bob Lowe (USA)



Dr. Gregor Thomas (Germany)

// 8565012 Bulk Fill 20 x 0.25g Repuestos Complet // 8560012 Bulk Fill 1 x 4g Repuestos de jeringa



Your Smile. Our Vision.
www.sdi.com.au

Australia 1 800 337 003
Austria 00800 0225 5734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Ireland 00800 0225 5734

Italy 00800 0225 5734
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 0225 5734
United Kingdom 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166

