



Fit Checker™ Advanced y Fit Checker™ Advanced Blue

La forma
más sencilla de
conseguir un acabado
correcto
de su trabajo
protésico

Para una comprobación simple,
fácil y precisa del ajuste
de su trabajo protésico.





Fit Checker™ Advanced Blue

La gradación de color azul ideal para



- Comprobar el ajuste de toda clase de trabajos protésicos, especialmente coronas y puentes de resina, cerámica y en base a óxido de circonio.
- Registrar la mordida y evaluar los contactos oclusales



La tixotropía equilibrada permite conseguir una **consistencia no pegajosa**. Bajo presión, Fit Checker Advanced Blue ofrece **un buen flujo** y una película extremadamente fina para un ajuste perfecto.



Los desajustes se detectan fácilmente gracias a una transparencia óptima y a la gradación de color azul única.



Por último, asegurarse del ajuste perfecto de las restauraciones indirectas es posible, evitando así oquedades marginales y la realización de grandes ajustes oclusales tras la cementación.

1

Fraguado rápido


Tiempo de trabajo suficiente y fraguado rápido (1 min en la boca) para un procedimiento rápido y cómodo.



2

Visualización clara y precisa

Una gradación cromática perfecta para ver de inmediato los contactos oclusales y las áreas donde el ajuste es defectuoso.

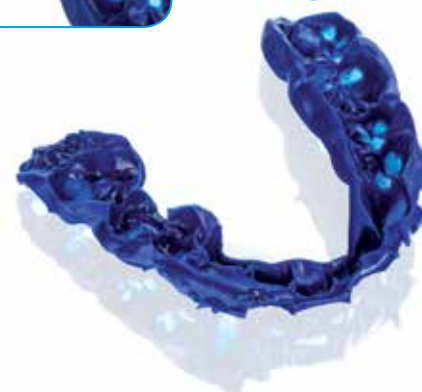



Fit Checker™ Advanced

La gradación de color blanco ideal para

- Comprobar el ajuste de toda clase de trabajos protésicos, especialmente prótesis removibles totales y parciales y coronas y puentes con base de metal.



La solución perfecta para comprobar la adaptación de las prótesis removibles totales y parciales.



Fit Checker Advanced ofrece la consistencia idónea y alta humectabilidad para mejorar el flujo en bases dentales y tejidos bucales. Fit Checker Advanced se limpia fácilmente en un solo paso.



A continuación, se pueden corregir los desajustes de la prótesis removable con rebases. Tras aplicar el rebase, se puede proceder a la comprobación final para asegurar la comodidad del paciente.

3 Sin complicaciones durante la realización de los ajustes

El material fraguado no queda atrapado en la fresa al aliviar los puntos de presión.

4 Fácil de despegar

La película de silicona se despega fácilmente para un procedimiento limpio y rápido.



La forma más sencilla de conseguir un acabado correcto de su trabajo protésico

Fit Checker Advanced y Fit Checker Advanced Blue de GC ofrecen una forma sencilla y precisa de evaluar el ajuste de las prótesis y de realizar adaptaciones oportunamente durante la sesión de ajuste / colocación, evitando así posibles costes futuros y garantizando la comodidad del paciente.

Fit Checker™ Advanced	Fit Checker™ Advanced Blue	Ventaja
Silicona VPES	Silicona VPES	Novedoso material de silicona con humectabilidad, fluidez y resistencia intrínsecas
Blanco	Azul	Dos colores diferentes para satisfacer todas las necesidades clínicas
Tiempo de trabajo: 1 minuto. Tiempo de fraguado: 1 minuto en la boca	Tiempo de trabajo: 1 minuto. Tiempo de fraguado: 1 minuto en la boca	Tiempo de trabajo suficiente y tiempo de fraguado breve en la boca
Handmix (tubos) o Automix (cartuchos)	Cartuchos Automix	Cartuchos Automix para un procedimiento sencillo, limpio y rápido



Presentaciones

GC Fit Checker™ Advanced / GC Fit Checker™ Advanced Blue	
004903	Fit Checker Advanced, envase de 1-1 (55 g + 50 g), blanco + retardador (3 g) + accesorios
004904	Fit Checker Advanced, cartuchos (2 x 62 g), blanco + puntas de mezcla IIS (3) y IISS (3)
004905	Fit Checker Advanced Blue, cartuchos (2 x 56 g), azul + puntas de mezcla IIS (3) y IISS (3)
800006	Dispensador de cartuchos II de GC
890130	Puntas de mezcla II de GC, 60 x SS (amarillas)
800100	Puntas de mezcla II de GC, 60 x SS (rosa)



DEPÓSITO DENTAL

al servicio de su laboratorio y clínica dental

DepoDent Depósito Dental

Oficinas comerciales
Castellón -- Tarragona

ventas@depodent.es
Tel. +34 911 976 174
WhatsApp 605 06 06 31
<https://depodent.es>

Centros Distribución:
Territorio Nacional

Cataluña-Levante
Centro-Madrid
Zona Norte